

# 折り畳み搬送ストレッチャー

## ～【ストコン】AD-010115～

### 取扱説明書








#### <もくじ>

- P1 ～ご使用前に～
- P2 ～点検・お手入れ・保管～
- P3 ～素材と仕様～
- P4 ～組み立て方①～
- P5 ～組み立て方②～
- P6 ～折り畳み方・付属品・オプション～

# ご使用前に

この度は、折り畳み搬送ストレッチャー ストコン「AD-010115」(以下;ストコン)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただく為に、この説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。  
この後、必要な時にすぐお読みいただける様に、大切に保管してください。

本文中の図記号表示の意味、内容は以下の通りです。	
	警告・・・ 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意・・・ 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
図記号の意味	
	「警告」や「注意」を要す事項を表します。
	「禁止」を表します。
	「必ずしてほしい行為」を表します。

## 【警告】

- 移動時には必ず安全ベルト(2ヶ所)をして下さい。
- 耐荷重120kgを超える方は使用しないでください。
- フレーム等に巻き込まれない服装で使用しないでください。
- 使用している間、介護者は介護される方から目を離さないでください。
- 人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外には使用しないでください。
- 本機を組み立ての際、必ず金具が固定されていることをご確認後、ご使用して下さい。
- 壊れた状態、不具合を感じた時は、速やかに使用をおやめいただき、すぐに販売店にご連絡を下さい。
- 改造はしないでください。
- 本機へ介護者を乗せ降ろしの場合は必ずキャスターのロックをして固定して下さい。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せて下さい。  
片側に体重がかかるような乗せ方で移動するとバランスを崩し転倒・転落の原因となります。

## 【注意】

- 階段・段差・溝・長い昇り降り坂での使用は危険です。
- シャワーストレッチャーではありません。湯水などを掛けないでください。
- エレベーターを使用する際、ドアの隙間に車輪が落としこまないか確認をして下さい。



ベッドなどから移乗またはベッドへの移乗は、必ず2名以上で行って下さい。



点検・整備・清掃をして下さい。

ボルト・ナットの緩み・フレームのゆがみ・ガタつきなどの点検を緩みがあれば締めて下さい。  
泥やほこりなどは、ぬれた布でふき取って下さい。あと乾いた布でふき、可動部分に潤滑油さして  
いただければ長くご使用いただけます。

## 点検・お手入れ・保管



### <使用前の点検>

- 1:昇降用ピンに異常はないか確認
- 2:キャスターに異常がないか確認
- 3:キャスターのロックがスムーズに行えるか確認



異常が見られた場合は、使用を中止しすぐに販売店までご連絡をお願い致します。

### <お手入れ>

マットレス・枕は水またはお湯で、汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は十分に乾燥させてからご使用下さい。

※注意:シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。

### <保管>

保管場所は室内で高温多湿でない直射日光が当たらない場所で保管をお願い致します。

折り畳んで立てて保管する場合は、倒れないように保管して下さい。


※倒れてケガ、損傷する場合があります。

●保証書……保証期間は1年間です。大切に保管をお願い致します。(別紙)


●アフターサービス……万が一故障・不具合などがございましたら、お買い上げいただいた販売店まで恐れ入りますがご連絡ください。

## 各部の名称と材質・仕様

### <担架の各部の名称>

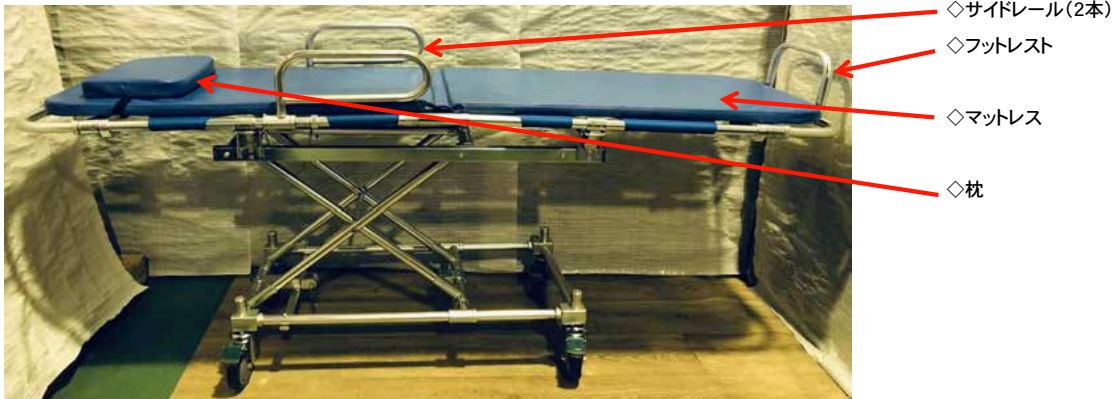

### <トランスポーターの各部の名称>

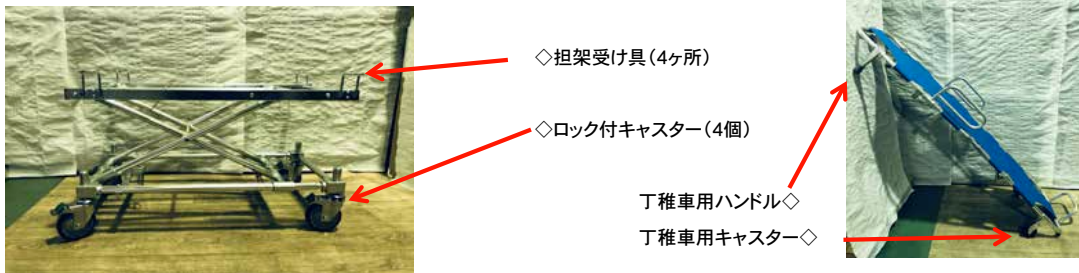

### <各部の材質・仕様>



品番	AD-010115
材質	フレーム部/アルミニウム合金
	マット・枕/ポリエステル
	クッション/ウレタン系ポリエステル
	安全ベルト・結束ベルト/PP・ポリエステル
	キャスター/PP・PU系樹脂(125mmφ)
重量	担架/8kg トランスポーター/約22kg
サイズ	長さ1920mm x 幅550mm
	高さ/下400mm 中610mm 上780mm
耐荷重	約120kg



## 組み立て方②

⑥サイドレールの倒し方は下の写真の通り、矢印の方向へスライドすることで

倒す事が出来ます。(起こす際は、カチッと音がする事を確認して下さい。)内側外側両方へ倒せます。

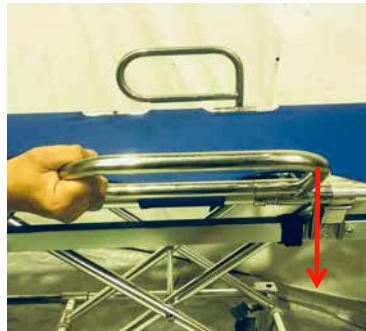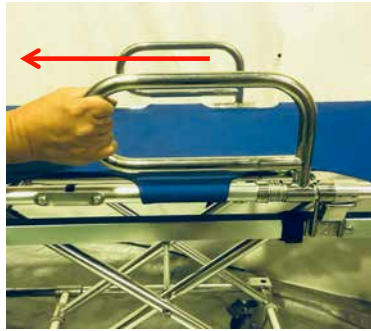


**\*トランスポーターとセットして保管の場合は内側へ倒して下さい。**

<丁稚式>

また、担架のみを使用し1名で搬送する事も出来ます。(丁稚車)

担架の内側に収納されています丁稚車用ハンドルと、キャスターを  
写真の様に4箇所起します。畳む時はボタンを押して畳みます。

(写真はキャスターですが、ハンドルの方法も同じです。)

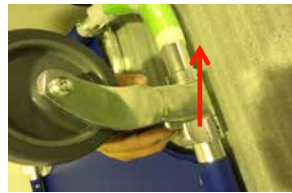

右写真の様に、一人でも楽に搬送する事が出来ます。



<ストレッチャー3段階の写真・サイズ>

\*マットレス・担架載せた場合6cmプラスです。

**※ストコンは昇降式ではありません。担架を載せた状態での高さ調節は出来ません。**



下段:400mm



中段:610mm



上段:780mm


## 折り畳み方① 付属品

<折り畳み方①>

①マットレス・枕・(点滴棒・酸素ボンベ架台)をおろします。

②担架のセンターにあるパイプを頭側から足側へスライドさせてから担架を二つ折ります。

(頭側は少し硬めにしています)

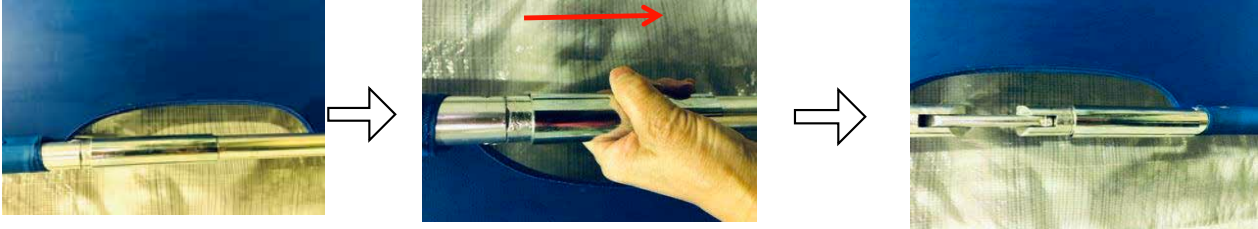

③サイドレール・ヘッドレストをたたみます。



④担架とトランスポーターを重ねて保管する場合はキャスター2ヶ所を担架の隅に入れます。

結束ベルトで固定して保管してください。

<付属品>

・点滴棒・マットレス・枕・安全ベルト・結束ベルト



黒: 安全ベルト  
青: 結束ベルト

# オプション

## <オプション>

・小物入れ・酸素ボンベ架台



・担架・・・背上げタイプ



背上げレバー

赤いレバーを中央へ寄せると角度変更できます。

3段階です。

